

JY-OP-I 电解抛光机

使用说明书

(中文版)

天津市精工医疗设备技术有限公司

JY-OP-I 电解抛光机

使用说明书

(中文版)

天津市精工医疗设备技术有限公司

电解抛光机JY-DP-I-1



电解抛光机JY-DP-I-2



电解抛光机JY-DP-I-1



电解抛光机JY-DP-I-2



非常感谢您选用我公司所生产JY-OP-I电解抛光机，请于使用前仔细阅读本说明书，并请保存好以备查。谢谢！

一、用途：

该机用于铸造冠及支架的电解抛光。

二、特点：

本机能耐酸、耐碱、并有数字显示，电子定时、连续调节电流等特点。

三、技术性能：

1. 工作电流：交流 $220 \pm 10V$ 50Hz

2. 电解电流：0——10A

3. 时 间：0——16分钟

四、使用方法：

（一）使用前的准备

1. 打开包装，检查机器及附件是否完整，仔细阅读说明书。

2. 将电源线与主机接通。

3. 将阳极、阴极（电解槽）固定好。

（二）使用

1. 将电解液倒入电解槽内。

2. 将电解件吊在阳极上，放入电解槽内。

3. 接通电源，打开定时开关，先选定时间然后调节电流，到时自动断电。

4. 当选时间不合适，可使用复位、开关，这时可重新调整电流大小以及时间长短。

非常感谢您选用我公司所生产JY-OP-I电解抛光机，请于使用前仔细阅读本说明书，并请保存好以备查。谢谢！

一、用途：

该机用于铸造冠及支架的电解抛光。

二、特点：

本机能耐酸、耐碱、并有数字显示，电子定时、连续调节电流等特点。

三、技术性能：

1. 工作电流：交流 $220 \pm 10V$ 50Hz

2. 电解电流：0——10A

3. 时 间：0——16分钟

四、使用方法：

（一）使用前的准备

1. 打开包装，检查机器及附件是否完整，仔细阅读说明书。

2. 将电源线与主机接通。

3. 将阳极、阴极（电解槽）固定好。

（二）使用

1. 将电解液倒入电解槽内。

2. 将电解件吊在阳极上，放入电解槽内。

3. 接通电源，打开定时开关，先选定时间然后调节电流，到时自动断电。

4. 当选时间不合适，可使用复位、开关，这时可重新调整电流大小以及时间长短。

五、注意事项：

1. 由于电解机长期在酸性物质中工作应注意电解槽的良好性，损坏前即更换新槽。
2. 经常清理电极保持接触良好及导电性。
3. 切勿使正负电极短路，以至损坏仪器。

五、注意事项：

1. 由于电解机长期在酸性物质中工作应注意电解槽的良好性，损坏前即更换新槽。
2. 经常清理电极保持接触良好及导电性。
3. 切勿使正负电极短路，以至损坏仪器。

信誉卡

尊敬的阁下：

欢迎您使用我公司JY-DP-I电解抛光机，对您的信任，我公司表示由衷地感谢。本机自售出之日起保修一年。

为了使该机器更好地为您服务，以及落实我公司的售后服务，请您在首次使用本机时将此卡寄回我公司本部，以便立档。

谢谢

天津市精工医疗设备技术有限公司

地址：天津市南开区雅安道资阳路5号鑫茂科技园A座

邮编：300190

电话：(022) 27622229 27622230 27030080 27030081 传真：(022) 27031637

信誉卡

尊敬的阁下：

欢迎您使用我公司JY-DP-I电解抛光机，对您的信任，我公司表示由衷地感谢。本机自售出之日起保修一年。

为了使该机器更好地为您服务，以及落实我公司的售后服务，请您在首次使用本机时将此卡寄回我公司本部，以便立档。

谢谢

天津市精工医疗设备技术有限公司

地址：天津市南开区雅安道资阳路5号鑫茂科技园A座

邮编：300190

电话：(022) 27622229 27622230 27030080 27030081 传真：(022) 27031637

请沿此线剪下

使用单位：（全称）_____ 联系人：_____

机器名称：_____ 机器编号：_____

单位地址：_____

单位电话：_____ 传真：_____ 邮编：_____

使用单位公章：

请沿此线剪下

使用单位：（全称）_____ 联系人：_____

机器名称：_____ 机器编号：_____

单位地址：_____

单位电话：_____ 传真：_____ 邮编：_____

使用单位公章：